



×



# ハートサインアプリ利用者向け OMRON Connectアプリ初期設定マニュアル


2024/03/26 版 for iOS

## ●OMRON connectとは

オムロンコネクト

オムロンヘルスケア社が提供する「OMRON connect」は、同社の通信機能付き家庭用医療機器（血圧計・体重計等）で測定した血圧・脈拍・体重などのデータをスマートフォンに転送し、記録を確認できる健康管理アプリです。

この「OMRON connect」アプリを、ハートサインをお使いのスマートフォンにインストールし、連携設定をすることで測定値をハートサインに取り込むことができます。これにより手入力の手間を省き、転記ミスも防ぐことで日々の記録をスムーズに行えるようになります。

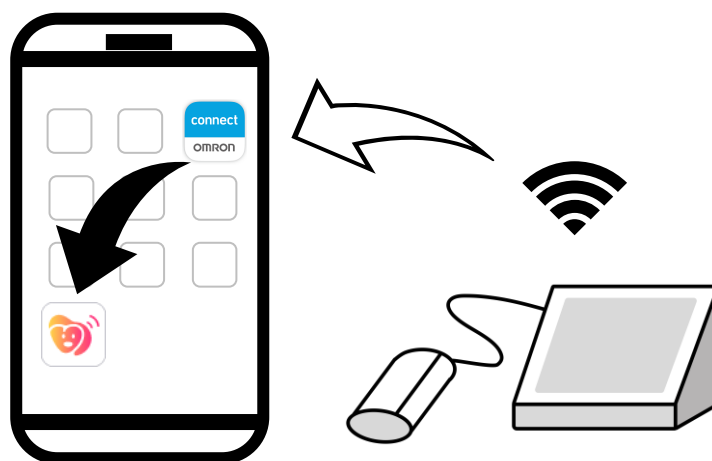

## OMRON connectを連携いただける動作環境

iPhone : iOS 15.5以降

以下の動作環境では「ハートサイン」はご利用いただけますが、OMRON connectとのアプリ間連携機能はご利用いただけません。

### ハートサイン動作環境

iPhone : OS 13以降

※機種がiPhone 7 / iPhone SE (初代)であればiOS 13以降にアップデートが可能です。

※ iPhone 6 Plus 以前の機種はiOS 13にアップデートできませんのでハートサインアプリがご利用いただける環境の対象外となります。

[iPhone(iOS)をご利用の方]

## OMRON connectアプリの初期設定

- ※健康情報をアプリ間で共有する際は、ユーザーによる連携許可が必要です
- ※事前にiPhoneの「ヘルスケア」アプリとの連携が必要です
- ※事前に「OMRON connect」での初期設定が完了していないとハートサインアプリとの連携が完了できません
- ※「OMRON connect」アプリは、iOS 15.5未満ではご利用いただけません

- 1 スマートフォンのカメラを起動してQRコードを読み込み、App Storeで「OMRON connect」アプリをインストールします



[▲クリックしてリンクへ移動します](#)

- 2 「OMRON connect」アプリを起動し、初期設定をはじめます  
画面表示に従って下記の内容をご確認・ご設定ください

- ・居住地の選択 > 日本
- ・OMRON connectエンドユーザー使用許諾契約 への同意
- ・OMRON connect個人情報取扱方針 への同意
- ・同意事項のチェック

- 3 OMRON connect対応機器の登録  
「登録開始」ボタンをタップ




## 4 お手持ちのオムロン社製機器の種類を選択しタップします



お手持ちのオムロン社機器を  
お手元にご準備ください

## 5 位置情報の許可 「許可」ボタンをタップすると「(測定機器)を探す」画面に切り替わります 画面の指示に従って、測定機器とスマートフォンを操作してください

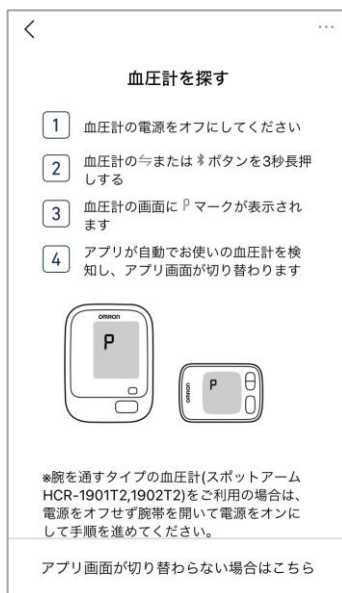

## 6 ペアリングの結果、表示された機器品番をタップして通信が完了するまで待ちます



### <画面表示が変わらないときは...>

測定機器をペアリングで探す際、機器の検出がうまくいかない場合は、アプリ画面下部にある

「アプリの画面が切り替わらない場合はこちら」ボタンから品番を選択して登録することができます



- 7** ご利用者情報（生年月日・性別）を登録します  
 ※入力は任意でありスキップすることができます

- 8** 登録が完了しました  
 「OK」をタップします

- 9** アプリの利用目的を選択してタップ  
 「✓」が付いたことを確認して、  
 「OK」ボタンをタップ

※入力は任意であり、スキップすることができます

## 10 OMRON connectのホーム画面へ移動します これでOMRON connectアプリの初期設定は完了です



▲OMRON connectのアカウントを作成／サインインしても  
登録を行わず「スキップ」してもホーム画面へ移動することができます

## [iPhone(iOS)をご利用の方] ヘルスケアとOMRON connectの連携

- ※健康情報をアプリ間で共有する際は、ユーザーによる連携許可が必要です
- ※先に「OMRON connect」での初期設定が完了していないとハートサインアプリとの連携が完了できません。
- ※「OMRON connect」アプリは、iOS 15.5未満ではご利用いただけません



iPhoneユーザーの方は、iPhoneに初めからインストールされている健康管理アプリ「ヘルスケア」を介してデータの取得を行います

- 1 「OMRON connect」アプリを起動します
- 2 アプリ下部の①「コンテンツ」をタップし、  
②「+コンテンツを追加」をタップ





- 3 コンテンツライブラリー下の「ヘルスケア連携」までスクロールし、「連携設定」をタップします



- 4 「ヘルスケアヘータを書き込み」の横にあるスイッチをオンに切り替えます  
(オンにすると緑色、オフにするとグレーに表示されます)



測定機器での測定データをiPhoneのヘルスケアに書き込めるようになり、スマートフォン内の他アプリでもデータを共有できるようになりました

## [iPhone(iOS)をご利用の方] ハートサインとOMRON connectの連携

OMRON connectアプリから計測データを取り込みます。

1



ハートサインアプリを起動します

2

ホーム画面を下にスクロールし、  
「通信対応機器から取り込む」ボタンをタップ



3

「ヘルスケアから取り込む」をタップ



- 4 取込むデータを選択し、「取り込む」ボタンをタップします



- 5 取り込み結果のデータが表示されます  
OMRON connectで取得した測定値が正常にハートサインに取り込まれました



「次へ」ボタンを押して他の記録へ進めます



## 連携がうまく行かないときは

OMRON connectからハートサインへのデータ転送がうまく行かないときは、ハートサインとヘルスケアの連携状況を確認してください。以下の手順をご確認ください

1



ハートサインアプリを起動します

2

ホーム画面「メニュー」から「通信機器設定」をタップします




3


「ヘルスケア」をタップします



## 連携がうまく行かないときは

4 「ヘルスケアを起動する」をタップします

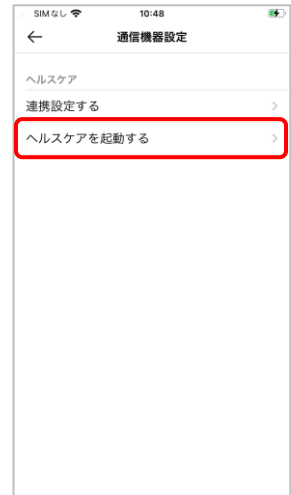

5  ヘルスケアアプリの画面に移動したら「共有」をタップして下へスクロールします




6 「App」もしくは「アプリおよびサービス」と表示されている箇所をタップします




## 連携がうまく行かないときは

7 「ハートサイン」をタップします

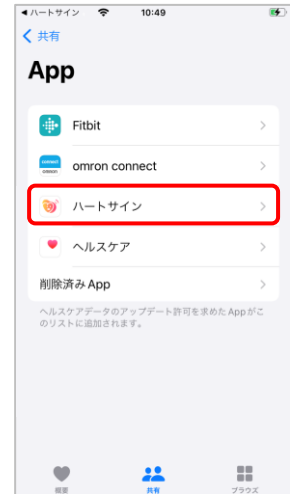

8 血圧、心拍数など取得したいデータをオンにします  
(スイッチをスライドして緑になるとON、  
オフにするとグレーになります)

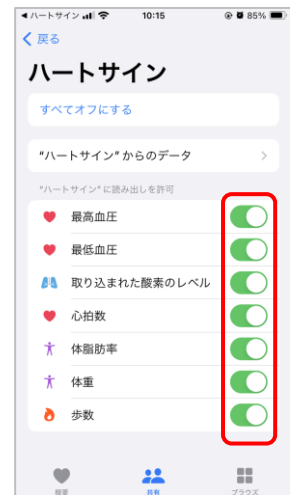

9 7,8の手順と同様に、  
「OMRON connect」でも  
データの共有が有効（オン）  
になっていることを確認します



再度p10～手順を行って、  
データ転送を完了してください