



ハートサイン をご利用の Android ユーザーの皆さまへ

Googleの仕様変更に伴い、**2026年以降** Google Fitからデータを取得するためには**ヘルスコネクタアプリの連携が必須**となります。

連携をしなければ **Google Fitのデータを取得できなくなります**ので、2025年中に設定を行ってください。

今まで



2026年以降



ヘルスコネクタアプリとは？

Google社が提供している歩数や運動量などの健康情報をまとめて管理できるアプリです。様々な健康アプリやウェアラブル端末からデータを集約できるため、自分の健康状態を総合的に把握できます。

設定方法

右記のQRコードからハートサインを最新版に更新し
下記の手順で2つの設定を行ってください。

ハートサインの
アップデートは
こちらから→



1 ヘルスコネクタとハートサインを連携する




①「メニュー」>「通信機器設定」
をタップ




②「Health Connect 連携
設定」の「連携設定へ」をタップ




③「連携する」をタップ

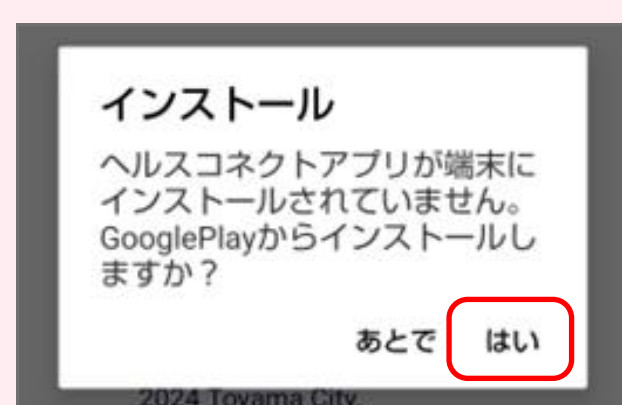


ヘルスコネクタがインストールされていない場合は、確認メッセージが表示されます。メッセージに従ってストアからインストールし、「使ってみる」をタップした後、ハートサインアプリへ戻ってもう一度「連携する」をタップしてください。

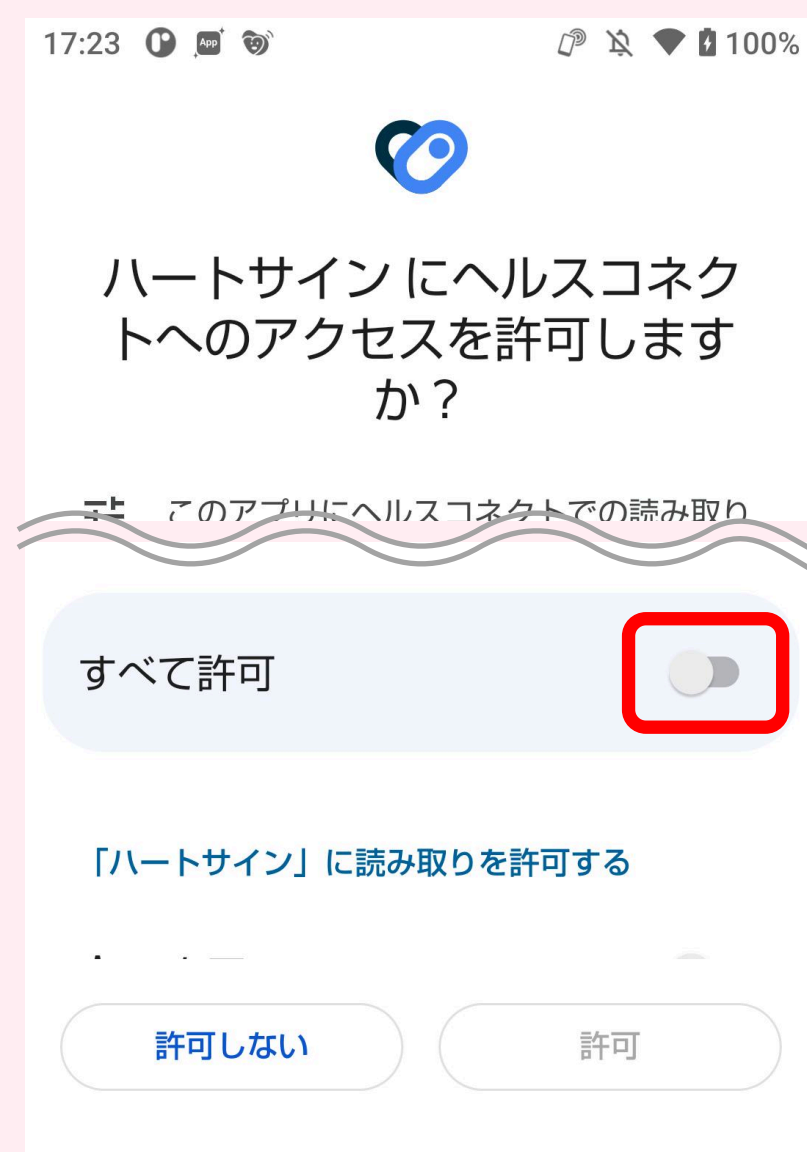

④「すべて許可」をオンにする

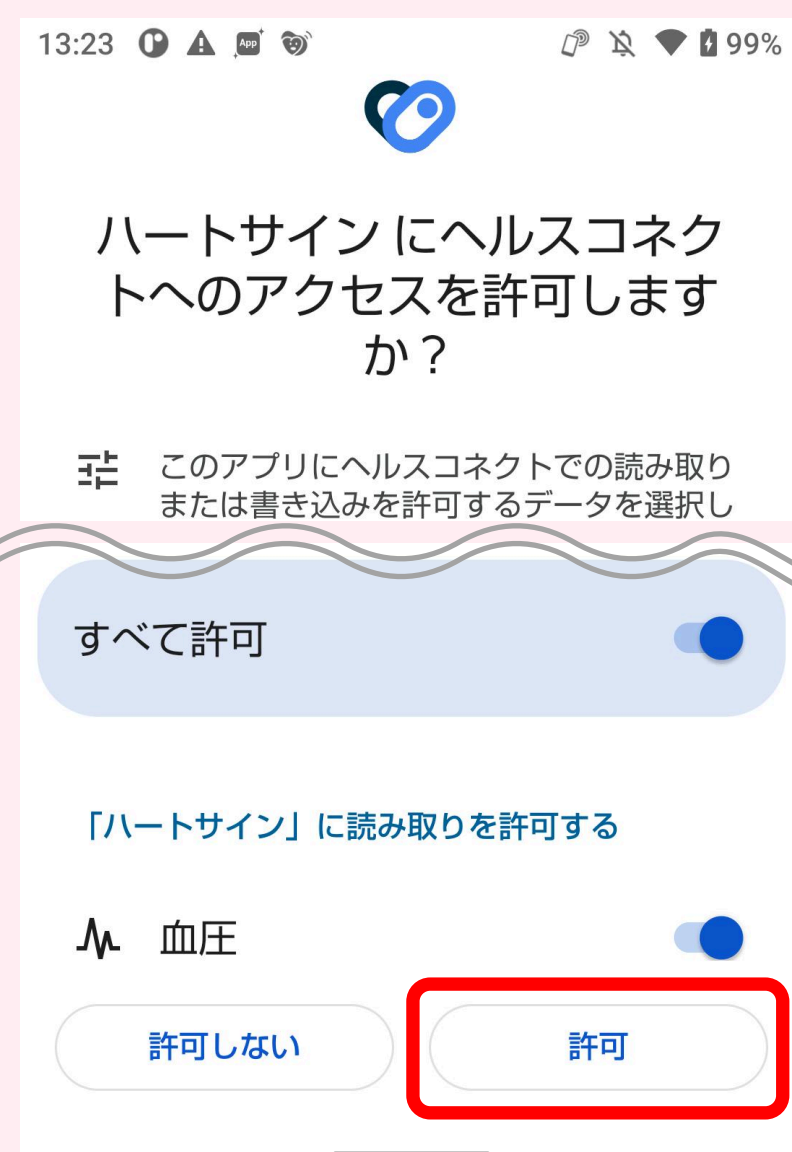

⑤「許可」をタップ

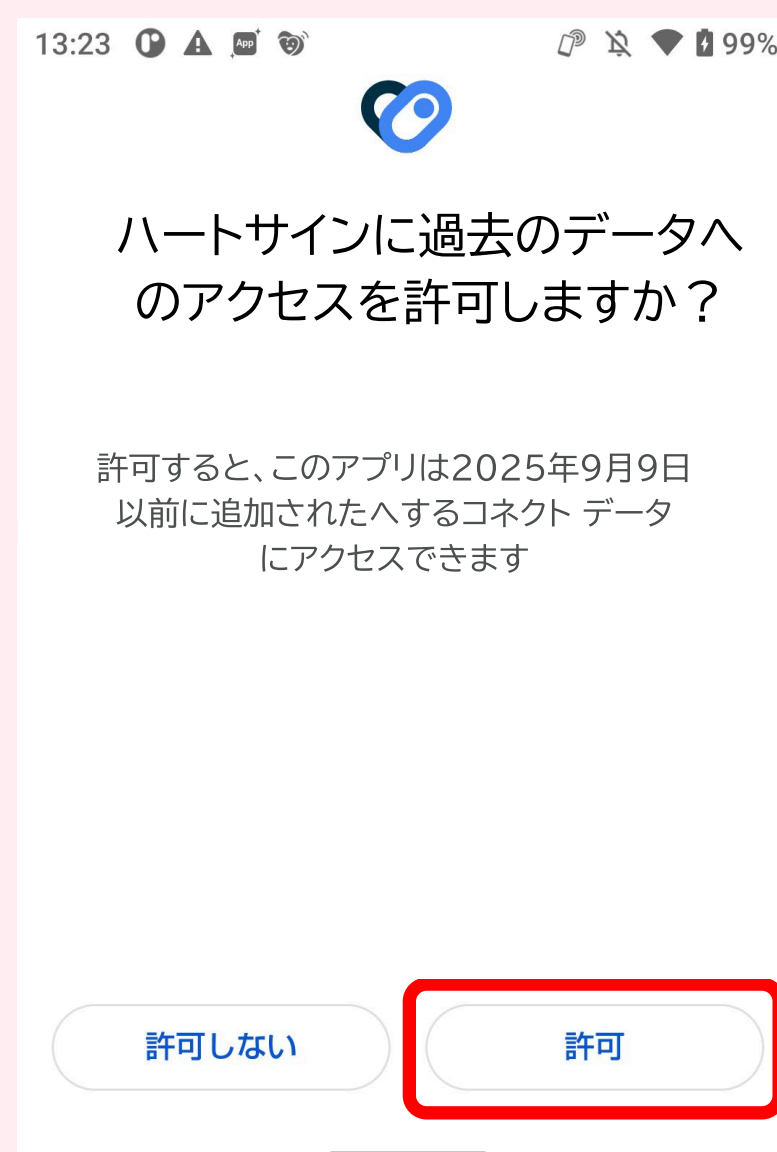

⑥「許可」をタップ



⑦「Health Connect」が「連携中」になったことを確認

2 Google Fit とヘルスコネクトを連携する



① Google Fit アプリを起動し右下の「プロフィール」をタップ




② 右上アイコン横の「歯車マーク」をタップ




③ 「Fit とヘルスコネクトを同期する」をオンにする



④「設定」をタップ

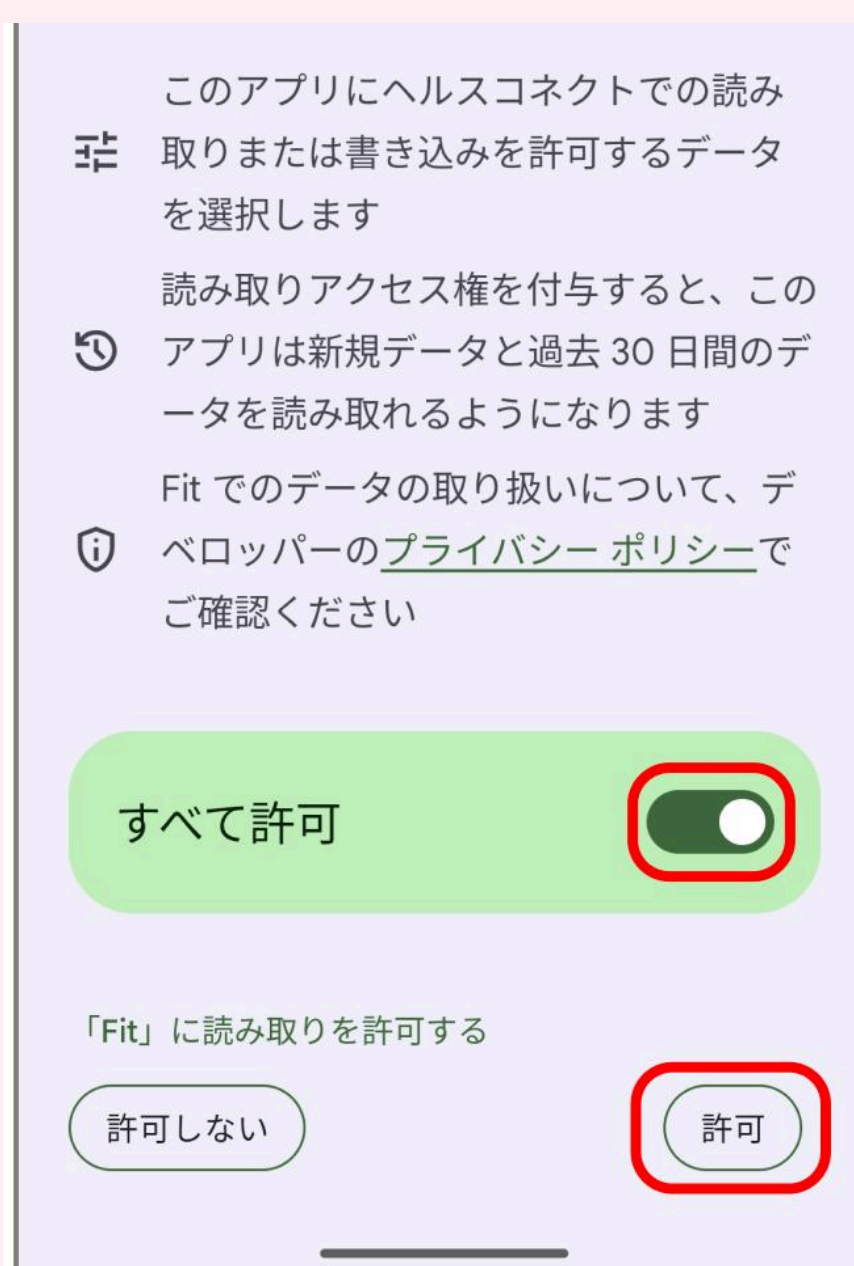

⑤「すべて許可」をオンにして「許可」をタップ

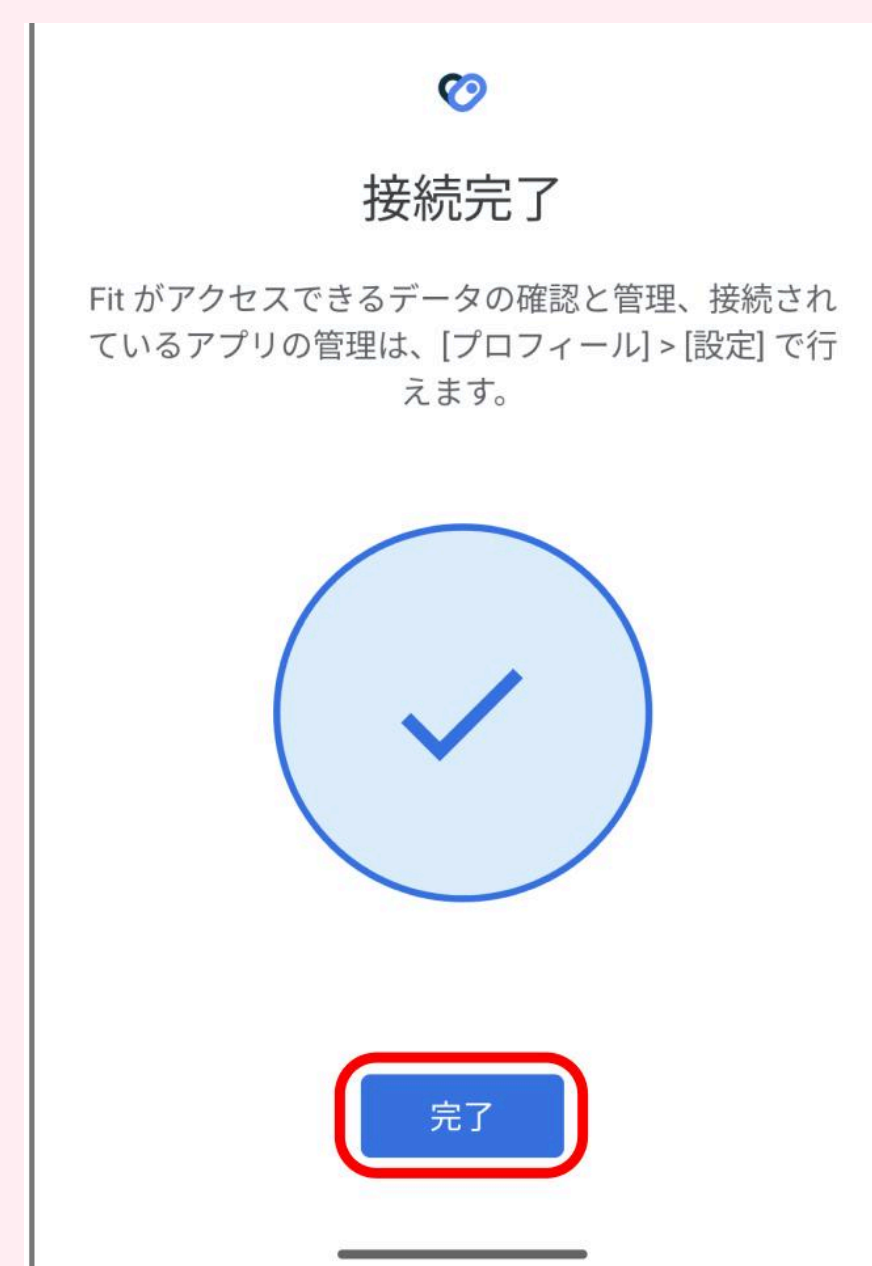

⑥「完了」をタップ